



Injektor für Komfort und Sicherheit

Maßgeschneidert - passt zu Ihrer Spritzenwahl

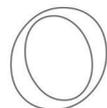

UnionMedico®
We do best for your drug

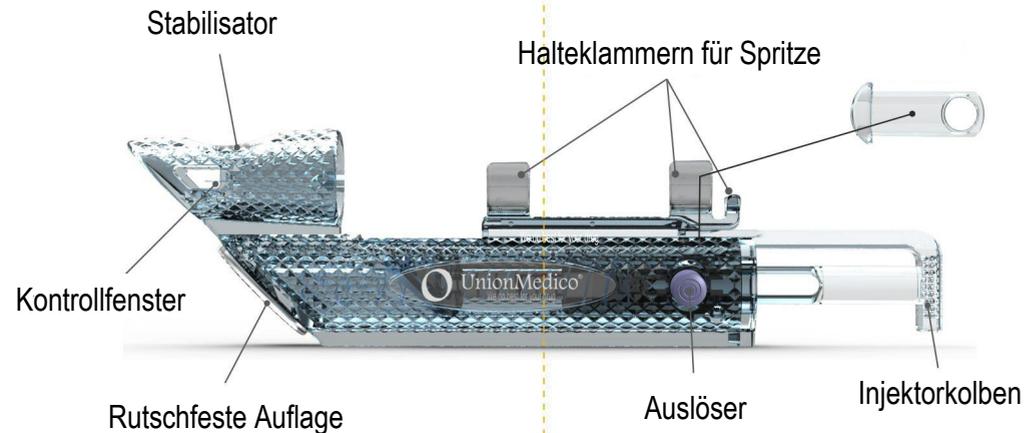

Patent, Trademark and Design Protected

INJEKTOR

Einfache Handhabung

- Kontrollierte Abgabe, gezielte Positionierung
- Bessere Medikamentenwirkung
- Aspirationstest, Vermeidung von Injektionen in Gefäße
- Einstellbare Gewebetiefe und Nadelwahl
- Ergonomisches ON-Lock-System
- Gesicherte Stabilität während der Injektion
- Wahl der Injektionstiefe subkutan
- Nadelschutz verbirgt die Nadel
- Rutschfeste 45-Grad-Auflagefläche
- Antrieb durch Federsystem
- Kontrollierte Gewebeausdehnung
- Rutschfester, ergonomisch geformter Gummigriff

Selbst-Injektion
ganz einfach
spritzen!

Vor Gebrauch

- ▶ Lassen Sie sich von Ihrem Arzt oder Apotheker über die richtige Nadellänge und den Injektionsort beraten.




- ▶ Stellen Sie sicher, eine korrekte Nadellänge zu nutzen, um das subkutane Gewebe unter der Haut zu erreichen.
- ▶ Wir empfehlen, das Medikament in den Oberschenkel oder das Gesäß zu spritzen, nicht aber unter den Bauchnabel oder in die Tailliengegend
- ▶ Sollte sich Ihr Gewicht/ BMI verändern, überprüfen Sie erneut die Nadelgröße und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.


1 Beginnen

- ▶ Lesen Sie bitte aufmerksam alle 11 Schritte dieser Anleitung sowie den Beipackzettel Ihres Medikaments.
- ▶ Bereiten Sie Spritze und Nadel gemäß der Medikamentenanleitung vor.
- ▶ Machen Sie ein paar Testläufe vor der Injektion! Bestücken/ Entnehmen/ Auslösen

2 Bestücken

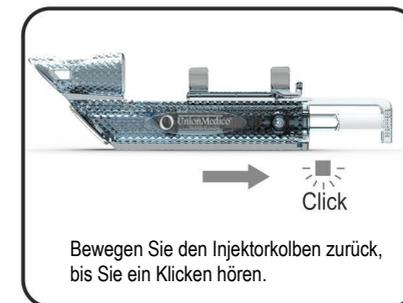

Bewegen Sie den Injektorkolben zurück, bis Sie ein Klicken hören.

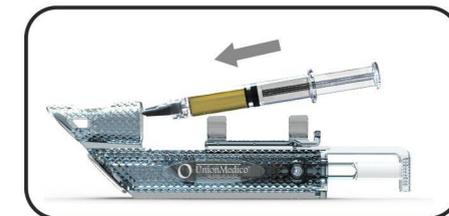

- ▶ Schieben Sie die Spritze in die Halteklammern des Injektors. (Stoßen Sie nirgends mit der Nadelspitze an.)

Sollte die Nadelspitze mit irgendetwas in Berührung kommen, tauschen Sie sie aus!