

Die Spritzenhalterung ist speziell für Ihre Spritzen gefertigt. Verwenden Sie nur diese, um eine korrekte Applikation zu gewährleisten.

Die Haut vorbereiten

Stellen Sie sicher, dass der Spritzenkörper in die Halteklammern einrastet.

Reinigen Sie Ihre Haut mit einem alkoholgetränkten Tupfer an der Stelle, an der Sie die Injektion vornehmen wollen.

Den Injektor platzieren

Legen Sie Ihren Zeigefinger auf den Injektor, Daumen und Mittelfinger auf den Oberschenkel, um den Injektor so sicher zu fixieren.

Nur! Für den Fall, dass Ihr BMI niedrig ist (15) und die Nadel Ihrer Spritze länger als das subkutane Gewebe, heben Sie das Gewebe etwas an, um eine Injektion in den Muskel zu verhindern. Sehen Sie dazu auch die Abbildungen oben und rechts an.

Für weitere Informationen zu Hautfalten / Nadelgrößen besuchen sie die Website: www.45-subcutaneous.info

Stellen Sie sicher, die richtige Nadelgröße zu nutzen, die zur Dicke Ihres Gewebes passt. (Die Aspirationskontrolle ist bei Injektion ins Gesäß nicht erforderlich.)

Spritzen Sie sich nicht selbst in die Nabel- oder Taillengegend.

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit.

Aktivieren

Berühren Sie nicht den Auslöser.

Schieben Sie mit Zeigefinger und Daumen der Hand, welche den Injektor hält, den Sicherheitsverschluss in Richtung "ON" bis zum Anschlag. Halten Sie ihn mittels eines leichten Drucks in dieser Position.

Sie haben den Injektor jetzt aktiviert.