





## 6 Starten der Injektion

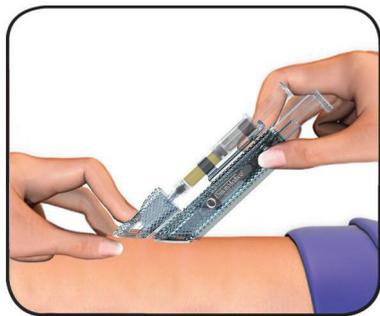


- ▶ Wenn Sie bereit sind, drücken Sie auf den Auslöser, um den Spritzenschlitten zu entriegeln und lassen Sie diesen auf Ihre Haut zugleiten.
- ▶ Lassen Sie nun den Sicherheitsverschluss los, während Sie weiterhin die Basis des Injektors mit dem Zeigefinger fixieren.
- ▶ **Halten Sie nicht den Spritzenschlitten fest!** Ihre Hände müssen gemäß der Abbildung platziert sein, um die korrekte Funktion des Injektors sicherzustellen. Vermeiden Sie, dass Ihre Hände die Bewegung des Spritzenschlittens behindern.

## 7 Aspiration und Kontrolle

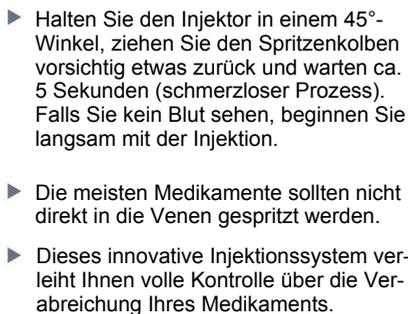


- ▶ Halten Sie den Injektor in einem 45°-Winkel, ziehen Sie den Spritzenkolben vorsichtig etwas zurück und warten ca. 5 Sekunden (schmerzloser Prozess). Falls Sie kein Blut sehen, beginnen Sie langsam mit der Injektion.
- ▶ Die meisten Medikamente sollten nicht direkt in die Venen gespritzt werden.
- ▶ Dieses innovative Injektionssystem verleiht Ihnen volle Kontrolle über die Verabreichung Ihres Medikaments.
- ▶ Mittels einer fehlerfreien Applikation Ihres Medikaments erreichen Sie die volle Wirkung Ihrer Medikation und reduzieren gleichzeitig das Risiko von Nebenwirkungen.

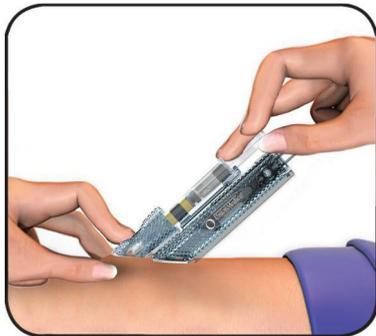



## 8 Setzen der Dosis

- ▶ Das Sichtfenster hilft Ihnen dabei, das Treffen einer Vene zu vermeiden.

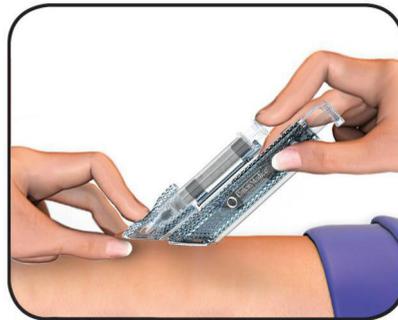

- ▶ Drücken Sie den Spritzenkolben langsam herunter, während Sie weiterhin die Basis des Injektors mit den Fingern fixieren. Für die Gabe von 1 ml sollten Sie ca. 10 Sek. rechnen, damit es zu einer kontrollierten Gewebeexpansion kommt.
- ▶ Sie können entweder Ihren Zeigefinger oder Ihren Daumen benutzen, um den Stempel herunterzudrücken.

## 9 Entfernen

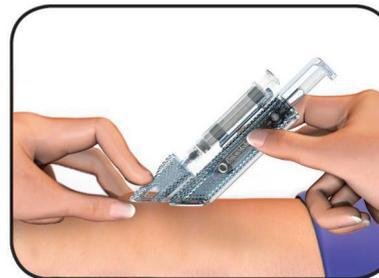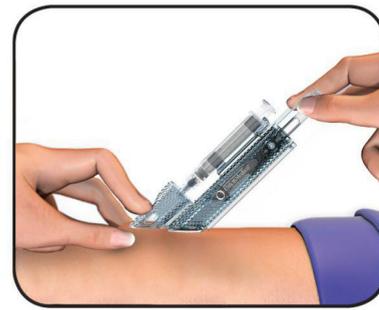

- ▶ Es gibt 2 Möglichkeiten, die Nadel aus der Einstichstelle zu entfernen - wählen Sie die Ihnen am angenehmste.