
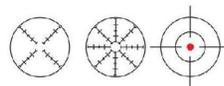


Injektor für Komfort und Sicherheit

Maßgefertigt - passend zu Ihrer Spritzenwahl

LED-Licht verhindert zu hohen Druck

Innovativer Auto-Injektor

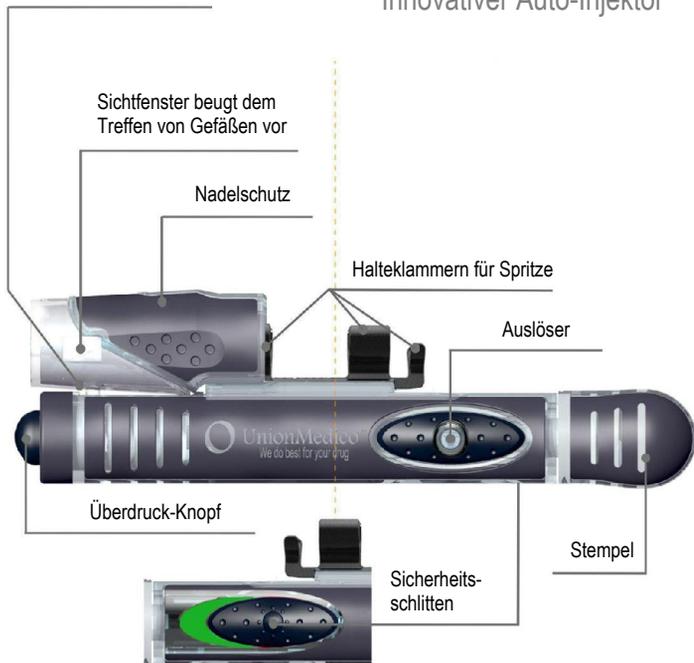


INJEKTOR


Einfache Handhabung

- Kontrollierte Abgabe, präzise Positionierung
- Hocheffizienter Medikamenten-Einsatz
- Aspirationstest / Vermeidung von Injektionen in Gefäße
- LED-Licht verhindert zu hohen Druck
- Gewebetiefe und Nadelwahl
- Sicherheitsverschluss / Kindersicherung
- Gesicherte Stabilität während des Eindringens der Nadel
- Wahl der Einstichtiefe, intramuskulär und subkutan
- Nadelschutz verbirgt die Nadel
- Antrieb durch Federsystem
- Kontrollierte Gewebeausdehnung
- Rutschfester, ergonomisch geformter Handgriff

Selbst-Injektion ganz einfach spritzen!

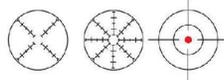

- ▶ Lassen Sie sich von Ihrem Arzt oder Apotheker über die richtige Nadellänge und den Injektionsort beraten.
- ▶ Stellen Sie sicher, eine korrekte Nadel-länge zu nutzen, um das subkutane Gewebe unter der Haut zu erreichen.
- ▶ Wir empfehlen, das Medikament in den Oberschenkel zu spritzen.
- ▶ Sollte sich Ihr Gewicht/ BMI verändern, überprüfen Sie erneut die Nadelgröße und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

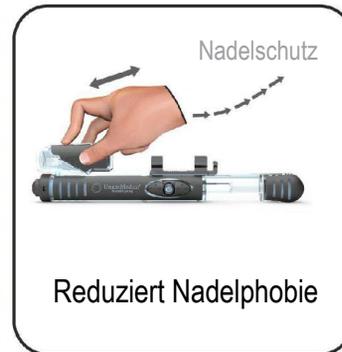

- ▶ Lesen Sie bitte aufmerksam alle 11 Schritte dieser Anleitung sowie den Beipackzettel Ihres Medikaments.
- ▶ Bereiten Sie Spritze und Nadel gemäß der Medikamentenanleitung vor.
- ▶ Machen Sie ein paar Testläufe vor der ersten Injektion!
Bestücken/ Entnehmen/ Auslösen

