



Zum Entriegeln des Injektors schieben Sie den Schieber nach vorne, der Indikator zeigt nun grün.

Kommen Sie nicht an den Auslöser, sobald Sie den Injektor aktiviert haben.

Die Spritzenhalterung ist speziell für Ihre Spritzen gefertigt. **Verwenden Sie nur diese, um eine korrekte und sichere Anwendung zu gewährleisten.**



Stellen Sie sicher, dass die Spritze korrekt in den Halteklammern einrastet.



► Führen Sie die Spritze in die Halteklammern des Injektors ein. (Stoßen Sie nirgends mit der Nadelspitze an.)

Sollte die Nadelspitze mit irgendetwas in Berührung kommen, tauschen Sie sie aus!

Benutzen Sie nur Spritzen und Nadeln, die identisch mit denen sind, welche Sie von Union Medico erhalten haben.

3 Vorbereiten der Haut



► Reinigen Sie Ihre Haut mit einem alkoholgetränkten Tupfer an der Stelle, an der Sie die Injektion vornehmen wollen.

4 Platzieren des Injektors




► Setzen Sie den Injektor vorsichtig in einem 90°-Winkel auf, das LED-Licht geht an. **Spritzen Sie jetzt noch nicht!**

► Fixieren Sie die Basis des Injektors mit der Hand, welche Sie nicht zum Bedienen des Injektors brauchen, und halten ihn ruhig. Die Spritze sollte sich gegenüber dieser Hand befinden.

PRESSEN SIE DEN INJEKTOR NICHT ZU FEST AUF DIE HAUT, WIE IM BILD UNTEN GEZEIGT.



- Drücken Sie den Injektor nur eben so sehr auf die Haut, dass das LED-Licht zu blinken anfängt. Dann halten Sie einen leichten Druck so aufrecht, dass das Licht an bleibt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Nadellänge verwenden, welche für die Dicke Ihres Gewebes angemessen ist.

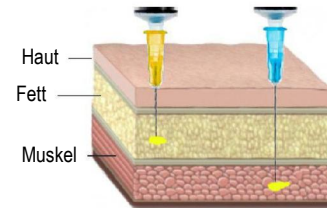

5 Aktivieren



- Benutzen Sie Zeigefinger und Daumen der Hand, mit der Sie den Injektor bedienen. Schieben Sie den Sicherheitsverschluss nach unten bis zum Anschlag. Der rote Indikator wird grün. Halten Sie den Verschluss mit leichtem Druck in dieser Position.
- **Sie haben den Injektor jetzt aktiviert.**