



100% Depotkontrolle
Kontrollierte Abgabe

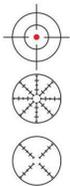


6 Starten der Injektion

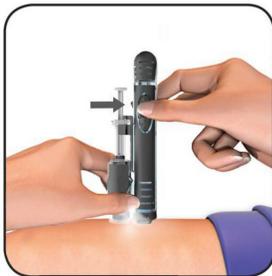

- ▶ Legen Sie den Zeigefinger auf den Auslöser am oberen Ende des Injektors.
- ▶ Entspannen Sie den Muskel, in welchen Sie spritzen wollen.
- ▶ Wenn Sie bereit sind, drücken Sie auf den Auslöser, um den Spritzenstempel freizugeben und ihn nach unten gleiten zu lassen.
- ▶ Halten Sie den Spritzenschlitten nicht fest! Ihre Hände müssen gemäß der Abbildung platziert sein, um die korrekte Funktion des Injektors sicherzustellen. Vermeiden Sie es, mit Ihren Händen die Bewegung des Spritzenschlittens zu behindern.

7 Aspiration und Kontrolle

- ▶ Halten Sie den Injektor gerade und ziehen Sie den Spritzenkolben vorsichtig für ca. 5 Sekunden zurück. (schmerzloser Prozess) Für den Fall, dass Sie kein Blut im Spritzenkörper sehen, setzen Sie die Injektion fort.
- ▶ Einige Medikamente dürfen NICHT direkt in Blutgefäße injiziert werden.
- ▶ Dieses innovative Injektionssystem verleiht Ihnen volle Kontrolle über die Verabreichung Ihres Medikaments.
- ▶ Mittels einer fehlerfreien Applikation Ihres Medikaments erreichen Sie die volle Wirkung Ihrer Medikation und reduzieren gleichzeitig das Risiko von Nebenwirkungen.

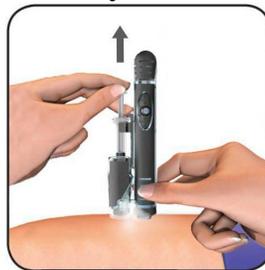

- ▶ Für den Fall, dass Sie eine Vene treffen sollten, sehen Sie Blut in den Spritzenkörper aufsteigen. Halten Sie inne und brechen die Injektion ab. Verwenden Sie eine neue Nadel und führen eine erneute Injektion in etwa 1 cm Abstand durch.

8 Setzen der Dosis




- ▶ Das Sichtfenster hilft Ihnen dabei, das Treffen einer Vene zu vermeiden.



- ▶ Drücken Sie den Spritzenkolben langsam herunter, während Sie weiterhin die Basis des Injektors fixieren. Für die Gabe von 1 ml sollten Sie ca. 10 Sek. rechnen, damit es zu einer kontrollierten Expansion des Gewebes kommt.
- ▶ Sie können den Kolben mit dem Zeigefinger oder Daumen herunterdrücken.

9 Entfernen

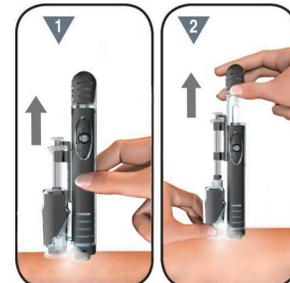

- ▶ Es gibt 2 Möglichkeiten, die Nadel aus der Einstichstelle zu entfernen - wählen Sie die Ihnen am angenehmste.
- ▶ 1. Ziehen Sie den Injektor in einem 45°-Winkel heraus. Das entfernt die Nadel aus Ihrer Haut. Ziehen Sie Injektor und Stempel zurück, bis Sie ein "Klick" hören.
- ▶ **Vorsicht:** Achten Sie darauf, sich selbst und andere nicht mit der Nadel zu verletzen.
- ▶ 2. Während Sie weiterhin die Basis des Injektors fixiert halten, ziehen Sie den Spritzenstempel zurück, bis Sie ein "Klick" hören. Das entfernt die Nadel aus Ihrer Haut.

Achtung: Lassen Sie den Spritzenschlitten nicht los, bevor Sie ein "Klick" hören, die Nadel könnte andernfalls wieder in die Haut gleiten.