

## 10 Entsorgen der Spritze



- ▶ Der Injektor ist wiederverwendbar
- ▶ Entfernen Sie die Spritze aus dem Injektor. Achtung: Setzen Sie den Nadelschutz nicht wieder auf die Spritze
- ▶ Entsorgen Sie Nadel und Spritze gemäß der medizinischen Anleitung.

## 11 Aufbewahrung und Reinigung



- ▶ Schieben Sie den Sicherheitsverschluss nach unten. Entspannen Sie den Spritzenschlitten mittels Drücken des Knopfes.
- ▶ Reinigen Sie den Injektor, indem Sie ihn mit einem in Seifenwasser angefeuchteten Tuch abwischen.
- ▶ Verstauen Sie den Injektor bis zur nächsten Anwendung in der Schachtel.

## Technische Daten

90° wiederverwendbarer Autoinjektor  
intramuskuläre & subkutane Anwendung  
Abmessungen: 145 mm x 38 mm  
Spritzengrößen: 0,5 - 6 ml  
Nadel: 30G und größer  
Nadellängen: 4 - 40 mm

### Einfache Handhabung

- Erhöhte Präzision und Sicherheit bei der Durchführung subkutaner Injektionen
- Reduzierung der Angst vor Spritzen
- Einfache Handhabung, gut geeignet für Menschen mit verminderter Funktionalität
- Durch die Option einer schrittweisen Verabreichung des Medikaments wird der Entstehung von Hämatomen vorgebeugt.
- Minimierung der Schmerzempfindung während der Injektion

## Qualität & Zertifizierung

- ▶ Getestet und verifiziert als hoch-effizientes Injektionssystem unter ISO Klassifikation 04.19.12
- ▶ Getestet gemäß EN 12182
- ▶ Getestet durch anerkanntes Institut, konstante Injektionsleistung und Lebensdauer für 2 Jahre wurden dokumentiert
- ▶ Zugelassen von FDA, Health Canada und CE-zertifiziert
- ▶ ISO 13485-zertifiziert und geprüft gemäß GMP

## Medizinische Qualitätsprodukte für mehr Lebensqualität

261792A05                      2014/07P1120001

Union Medico  
Symbion Science Park  
Fruebjergvej 3  
DK 2100 Kopenhagen  
[www.unionmedico.com](http://www.unionmedico.com)

Produktinformationen:  
[www.90-injection.info](http://www.90-injection.info)

Auto-Injektor  
Kontrollierte Abgabe

90

CE

Intramuskulär • Subkutan  
[www.90-injection.com](http://www.90-injection.com)